

FRONTE

OFTAlacrim

INDICAÇÕES



OFTAlacrim, é um dispositivo médico para aplicação oftálmica constituído por uma solução salina estéril, viscosa, ligeiramente hipotónica, com pH fisiológico, sem conservantes, sem fosfatos, à base de ácido hialurónico e água destilada de Hamamelis. A elevada concentração de ácido hialurónico proporciona ao olho uma maior hidratação e, em caso de alteração da película lacrimal, restaura o seu equilíbrio.






OFTAlacrim é recomendado para proteger e hidratar a superfície ocular em caso de vermelhidão, ardor e fadiga ocular devido a:

- Síndrome do olho seco,
- Stress Ambiental (pó, alergénios, fumo, ar condicionado, poluição ambiental),
- Stress visual devido à utilização prolongada de aparelhos eletrónicos (computadores, televisão, ecrãs), ao estudo intenso e à condução prolongada.

OFTAlacrim é uma solução refrescante desenvolvida para as pessoas que sofrem de olho seco ocasional ou de falta de lágrima. Proporciona um alívio imediato e restabelece o bem-estar quotidiano. OFTAlacrim pode ser instilado antes da aplicação e durante a utilização de lentes de contacto para melhorar a aplicação e o conforto.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Retirar o selo de segurança do recipiente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos antes da utilização.
3. Retirar a tampa de proteção.
4. Pressionar, suavemente, o recipiente e instilar (aplicar) 1/2 gotas por olho.
5. Depois da aplicação, fechar o recipiente, guardá-lo na embalagem original e reutilizar a restante solução no prazo de 3 meses.
6. O produto destina-se a ser utilizado por um único utilizador para evitar possíveis contaminações.
7. O produto pode ser utilizado com lentes de contacto.

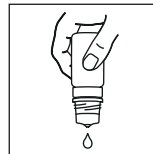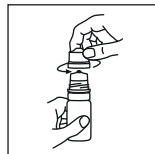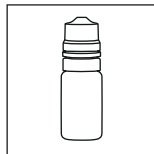

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

Instilar (aplicar) 1-2 gotas por olho, 2-3 vezes por dia ou de acordo com a indicação do médico.

COMPOSIÇÃO

Ácido hialurónico 0,4%, água destilada de Hamamelis Virginiana, cloreto de sódio, citrato de sódio tribásico di-hidratado, ácido cítrico mono-hidratado, água purificada.

RETRO

EMBALAGEM

A embalagem é composta por um frasco de 10 ml sem conservantes. O recipiente é reutilizável.

AVISOS:

- O produto é apenas para uso oftálmico, não ingerir ou utilizar para além da indicação de utilização.
- Uma vez aberto, o recipiente deve ser fechado com a tampa e a solução residual deve ser usada no prazo de 3 meses para evitar possíveis contaminações do produto.
- Antes da instilação, verificar a abertura do doseador; se houver resíduos, limpar com um pano húmido e expelir uma gota antes da utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não tocar no olho ou noutras superfícies com o bocal do frasco durante a instilação.
- Não utilizar o produto em caso de incompatibilidade conhecida, mesmo apresentando incompatibilidade apenas com um único componente da fórmula.
- Se necessário, verificar com o seu oftalmologista, a compatibilidade com as lentes de contacto que utiliza.
- Em caso de reação adversa durante a utilização, suspender o tratamento e consultar o médico ou farmacêutico.
- Consulte o seu médico para uso o durante a gravidez, lactação e em crianças.
- O tratamento com medicamentos oftálmicos ou dispositivos médicos oftálmicos deve ser efetuado sob a supervisão de um médico que possa avaliar as possíveis interações.
- Em caso de a superfície ocular estar comprometida ou de danos na córnea, consultar o médico.
- Não usar o produto depois de ter passado o prazo de validade indicado na embalagem.
- Em caso de reclamações ou incidentes graves relacionados com o dispositivo, é necessário comunicar o incidente ao fabricante e à autoridade competente do estado membro envolvente, para obter mais informação sobre a segurança deste dispositivo médico.

VALIDADE:

36 meses com a embalagem intacta.



Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n° 26; 41012 Carpi (MO), Itália



STERILE A



Visum Pharm, Lda – Rua Drº António Cândido Nº 10, 2º Andar Lisboa, Portugal


VISUM
PHARM

Rev.02 janeiro 2025

Informações / Info

Cliente / Client **VISUM PHARM**
Produto / Product **OFTALACRIM**
Trabalho / Job Name **INSERTO 150X130MM**
Data / Date **2025**
Software **ADOBE ILLUSTRATOR**
Escala / Scale **100%**

Cores / Colours

CORES IMPRESSAS PRINTING COLORS			
01	CYAN	06	COR/COLOR
02	MAGENTA	07	COR/COLOR
03	YELLOW	08	COR/COLOR
04	BLACK	09	COR/COLOR
05	COR/COLOR	10	COR/COLOR

Av. Almirante Reis, nº 201, 1º andar, 1000-048 Lisboa Tel. 21 315 23 71 | www.manchacriativa.pt

CORES NÃO IMPRESSAS NONPRINTING COLORS	
01	CORTANTE / CUTTER
02	DOBRAS / FOLD
03	NONPRINT
04	NONPRINT
05	NONPRINT

ACABAMENTOS SPECIAL FINISHES	
01	NONPRINT
02	NONPRINT
03	NONPRINT
04	NONPRINT
05	NONPRINT

Anotações

A Mancha Criativa recomenda sempre a visualização de uma prova de cor antes da produção final, de modo à assegurar que eventuais problemas possam ser corrigidos.

mancha
criativa