

## INSTRUÇÕES DE USO



# OFTAlacrim



### INDICAÇÕES

**OFTAlacrim**, é um dispositivo médico para aplicação oftálmica constituído por uma solução salina estéril, viscosa, ligeiramente hipotónica, com pH fisiológico, sem conservantes, sem fosfatos, à base de ácido hialurónico e água destilada de Hamamelis. A elevada concentração de ácido hialurónico proporciona ao olho uma maior hidratação e, em caso de alteração da película lacrimal, restaura o seu equilíbrio.

**OFTAlacrim** é recomendado para proteger e hidratar a superfície ocular em caso de vermelhidão, ardor e fadiga ocular devido a:


- Síndrome do olho seco,
- Stress Ambiental (pó, alergénios, fumo, ar condicionado, poluição ambiental),
- Stress visual devido à utilização prolongada de aparelhos eletrónicos (computadores, televisão, ecrãs), ao estudo intenso e à condução prolongada.

**OFTAlacrim** é uma solução refrescante desenvolvida para as pessoas que sofrem de olho seco ocasional ou de falta de lágrima. Proporciona um alívio imediato e restabelece o bem-estar quotidiano.

**OFTAlacrim** pode ser instilado antes da aplicação e durante a utilização de lentes de contacto para melhorar a aplicação e o conforto.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1. Retirar o selo de segurança do recipiente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos antes da utilização.
3. Retirar a tampa de proteção.
4. Pressionar, suavemente, o recipiente e instilar (aplicar) 1/2 gotas por olho.
5. Depois da aplicação, fechar o recipiente, guardá-lo na embalagem original e reutilizar a restante solução no prazo de 3 meses.
6. O produto destina-se a ser utilizado por um único utilizador para evitar possíveis contaminações.
7. O produto pode ser utilizado com lentes de contacto.

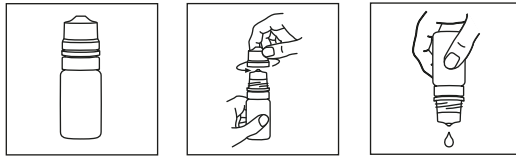

### FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO:

Instilar (aplicar) 1-2 gotas por olho, 2-3 vezes por dia ou de acordo com a indicação do médico.

### COMPOSIÇÃO:

Ácido hialurónico 0,4%, água destilada de Hamamelis Virginiana, cloreto de sódio, citrato de sódio tribásico di-hidratado, ácido cítrico mono-hidratado, água purificada.

### EMBALAGENS:

A embalagem é composta por um frasco de 10 ml sem conservantes. O recipiente é reutilizável.

### AVISOS:

- O produto é apenas para uso oftálmico, não ingerir ou utilizar para além da indicação de utilização.
- Uma vez aberto, o recipiente deve ser fechado com a tampa e a solução residual deve ser usada no prazo de 3 meses para evitar possíveis contaminações do produto.
- Antes da instilação, verificar a abertura do doseador; se houver resíduos, limpar com um pano húmido e expelir uma gota antes da utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não tocar no olho ou noutras superfícies com o bocal do frasco durante a instilação.
- Não utilizar o produto em caso de incompatibilidade conhecida, mesmo apresentando incompatibilidade apenas com um único componente da fórmula.
- Se necessário, verificar com o seu oftalmologista, a compatibilidade com as lentes de contacto que utiliza.
- Em caso de reação adversa durante a utilização, suspender o tratamento e consultar o médico ou farmacêutico.
- Consulte o seu médico para uso o durante a gravidez, lactação e em crianças.
- O tratamento com medicamentos oftálmicos ou dispositivos médicos oftálmicos deve ser efetuado sob a supervisão de um médico que possa avaliar as possíveis interações.
- Em caso de a superfície ocular estar comprometida ou de danos na córnea, consultar o médico.
- Não usar o produto depois de ter passado o prazo de validade indicado na embalagem.
- Em caso de reclamações ou incidentes graves relacionados com o dispositivo, é necessário comunicar o incidente ao fabricante e à autoridade competente do estado membro envolvente, para obter mais informação sobre a segurança deste dispositivo médico.

### VALIDADE:

36 meses com a embalagem intacta.



Enable Innovations S. r. l., Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Itália



VISUM PHARM, Lda, Rua Drº António Cândido Nº 10 2º Andar, Lisboa, Portugal  
Correio eletrónico: info@visuspharm.com

Rev.02 janeiro 2025



STERILE A



VISUM<sup>LDA</sup>  
PHARM