



# OFTAlipid

OFTAlipid Gotas oculares à base de lipossomas e hialuronato de sódio de peso molecular médio, solução estéril e sem conservantes em frascos monodose de 0,5 ml

## INDICAÇÕES:




OFTAlipid é um dispositivo médico para aplicação oftálmica constituído por uma solução salina estéril, ligeiramente hipotónica e pH fisiológico, sem conservantes, com combinação de hialuronato de sódio de peso molecular médio e lipossomas, em frascos monodose de 0,5 ml.

Os lipossomas em combinação com ácido hialurónico fornecem um suporte funcional à superfície ocular, reconstituindo a camada lipídica, utilizada para limitar e controlar a evaporação da película lacrimal. OFTAlipid é também capaz de regular e melhorar a lubrificação e hidratação da mucosa ocular.

OFTAlipid é recomendada para o alívio da vermelhidão ocular, seca e cansaço causados pela síndrome do olho seco, particularmente, devido à qualidade insuficiente da camada lipídica da superfície ocular, pelo stress ambiental (pó, alergénios, fumo, poluição atmosférica, ar condicionado) e pelo stress ocular devido ao prolongamento do uso do computador, televisão e ecrãs. O produto pode ser usado até pelos utilizadores de lentes de contacto, sem terem de as remover, para melhorar a lubrificação e o conforto dos olhos.

## INSTRUÇÕES DE USO:

1. Abrir a bolsa de proteção de alumínio
2. Lavar cuidadosamente as mãos antes de usar
3. Separar o frasco de dose única da tira e abrir, rodando a tampa
4. Pressionar, suavemente, o frasco de dose única e instilar 2/3 gotas por olho
5. Depois da instilação, fechar imediatamente o frasco e reutilizar a solução residual no prazo de 12 horas
6. Guardar os frascos não utilizados na embalagem original
7. O produto é de um único utilizador, para evitar possíveis contaminações
8. O produto pode ser usado com lentes de contacto

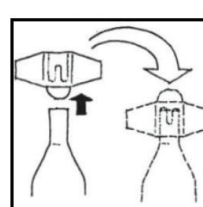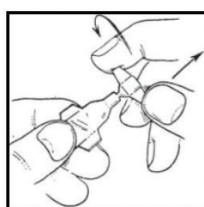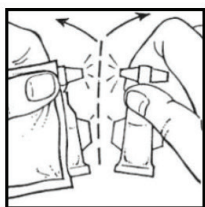

**FREQUÊNCIA DO USO:** Instilar 2/3 gotas por olho, 1-2 vezes por dia, ou de acordo com a indicação do médico.

**COMPOSIÇÃO:** Lipossoma 0041 1%, Hialuronato de Sódio, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio tribásico di-hidratado, Ácido Cítrico mono-hidratado, Água Purificada.



## EMBALAGEM:

A caixa é composta por 2 bolsas de alumínio, cada uma contendo uma tira de 5 frascos de dose única. Cada frasco de dose única está cheio até 0,5mL e é reutilizável.

## AVISOS:

- O produto é apenas para uso oftálmico, não ingerir ou utilizar para além da indicação de utilização
- Uma vez aberto, o frasco de dose única pode ser fechado com a tampa apropriada e a solução residual pode ser reutilizada no prazo de 12 horas para evitar possíveis contaminações do produto
- Manter fora do alcance das crianças
- Durante a instilação não tocar no olho ou em outras superfícies com o bocal do frasco de dose única
- Não utilizar o produto em caso de incompatibilidade conhecida, mesmo apresentando incompatibilidade apenas com um único componente da fórmula
- Se necessário, verificar com o seu oftalmologista, a compatibilidade com as lentes de contacto utilizadas
- No caso de reação adversa durante o uso, suspender imediatamente o tratamento e consultar o seu médico
- Consultar o seu médico para uso durante a gravidez, lactação e para crianças
- O tratamento com medicamentos oftálmicos ou outros dispositivos médicos oftálmicos deve ser efetuado sob a supervisão de um médico que possa avaliar as possíveis interações
- Em caso de comprometimento da superfície ocular ou lesão da córnea, consultar o seu médico
- Não usar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem
- Em caso de reclamações ou incidentes graves relacionados com o dispositivo, deve ser reportado o incidente ao fabricante e à autoridade do Estado-Membro em que o utilizador está estabelecido, para obter mais informações sobre a segurança deste dispositivo médico
- O produto contém soja

## VALIDADE:

36 meses com a embalagem intacta.



Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n° 26; 41012 Carpi (MO), Itália



Visum Pharm, Lda - Rua Dr° António Cândido N° 10 2° Andar Lisboa, Portugal

Rev.03 janeiro 2025

