

KERATOSEPT®

Folheto Informativo

KERATOSEPT®
Gotas oculares

Gotas oculares lubrificantes, hidratantes e protetoras do epitélio.

Descrição:

O KERATOSEPT® é um hidrogel aquoso e estéril que contém:

- Álcool polivinílico, com ação lubrificante, hidratante, viscoelástica, mucoadesiva, protetora;
- Dexpanthenol, pertencente à classe das vitaminas do grupo B, homólogo do ácido pantoténico, nutriente vitamínico dos tecidos, protetor do epitélio;
- Disetionato de hexamidina, cloridrato de polihexanida e edetato dissódico (substâncias antissépticas) e outros excipientes, para utilização nos tecidos oculares por instilação.

Devido às propriedades dos seus componentes, o dispositivo médico resulta eficazmente como adjuvante do processo de reepitelização da córnea após o stress causado por lentes de contacto, ar condicionado, irradiação solar, lâmpadas artificiais ou ecrãs de computador. A presença do antisséptico na fórmula, garante a esterilidade da solução oftálmica após a primeira abertura do frasco e é útil para proteger os tecidos oculares da irritação e possível sépsis ambiental causada pela poluição atmosférica, fumo, poeira, ar poluído, pois acalma esses tecidos.

No dispositivo médico, a concentração de álcool polivinílico (1,25%) foi adequadamente estudada para conferir características reológicas semelhantes às do líquido lacrimal e uma propriedade adesiva eficaz na mucosa ocular com efeito lubrificante, hidratante e protetor, sem causar visão turva.

Este hidrogel assegura um efeito prolongado dos componentes na mucosa ocular, favorecendo a eficácia nutritiva-vitamínica coadjuvante da reepitelização.

O metilsulfonilmetano presente entre os excipientes da fórmula, substância que contém enxofre biologicamente ativo, não desenvolve qualquer ação farmacológica específica, mas facilita a absorção do dexpanthenol, graças à ativação da permeabilidade celular.

KERATOSEPT® é um líquido aquoso coloidal caracterizado pelas seguintes propriedades físico-químicas: É perfeitamente transparente e incolor; é miscível com o líquido lacrimal em todas as proporções; tem o valor de pH, a viscosidade, a osmolaridade perfeitamente compatível com os tecidos oculares e o líquido lacrimal e por este motivo tem um elevado grau de tolerabilidade.

Composição: Álcool polivinílico 1,25%, dexpanthenol, disetionato de hexamidina 0,050%, cloridrato de polihexanida 0,0001%, metilsulfonilmetano, edetato dissódico, fosfato de sódio dibásico, fosfato de potássio monobásico, água purificada.

Instruções de utilização: Instilar 1-2 gotas do dispositivo médico no fundo do saco conjuntival inferior do olho, pressionando ligeiramente o corpo do frasco. É possível instilar o produto 2-3 ou mais vezes por dia quando necessário.

Precauções: Devido à ausência de sais de amónio quaternário, o dispositivo médico pode ser utilizado também por utilizadores de lentes de contacto moles e rígidas.

- Não tocar no olho com a ponta do conta-gotas.
- Não utilizar em caso de infeção ocular.
- Não utilizar juntamente com outras gotas oculares.
- Não utilizar em caso de incompatibilidade conhecida com qualquer componente do produto.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso na caixa.
- Deitar fora o produto 30 dias após a primeira abertura.

Armazenamento: Não conservar o produto acima de 25°C.

Avisos: Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Embalagem: Frasco de 10 ml.

KERATOSEPT® é um dispositivo médico.

Nota: a fórmula do dispositivo médico está protegida por uma patente italiana.

STERILE A

CE
0373

IS0470
00/0719



Bruschetti S.r.l. - Via Isonzo 6 - 16147
Génova (Itália)